



SOLUCIONES RESTAURATIVAS



Desde preparación hasta acabado

Soluciones Restaurativas de Ultradent reúne algunos de nuestros productos favoritos para ayudarle a crear restauraciones tan hermosas como duraderas.




SOLUCIONES RESTAURATIVAS

Preparación

HALO
SECTIONAL MATRIX SYSTEM

Magníficos resultados en menos tiempo

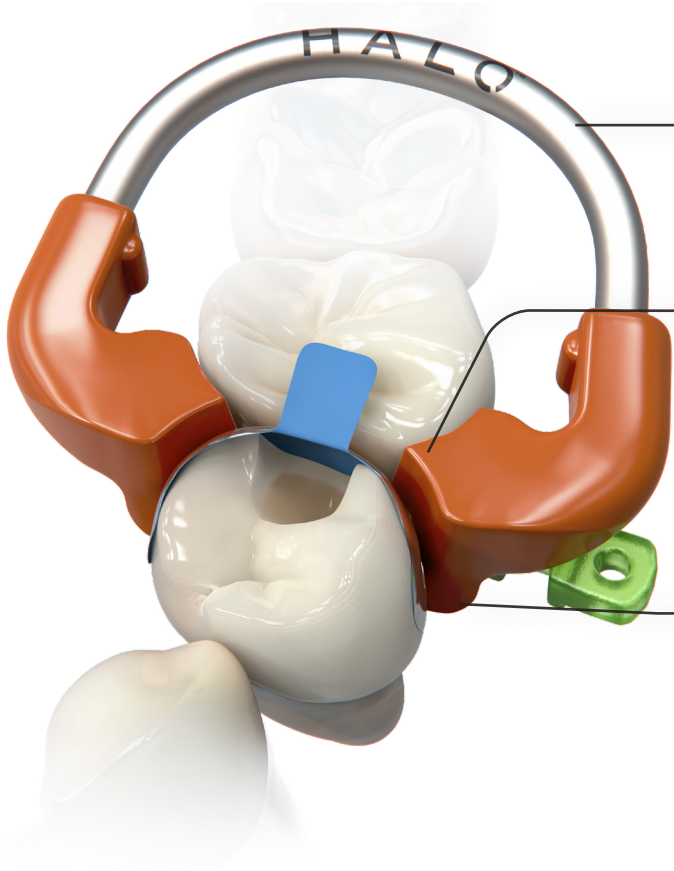


- **Anillos de Nitinol, fuertes y flexibles**, reutilizable hasta 1000 veces
- Los contornos en forma de pico **ayudan a eliminar los excesos y reducir el tiempo necesario**
- Ajuste **Perfecto**, para mantener los puntos de contacto

Guía de colocación:



1.

Seleccione una banda matriz con la altura oclusogingival adecuada. Con pinzas, sujete la pestaña, dóblela según sea necesario y colóquela interproximalmente con la superficie cóncava hacia el diente a restaurar.

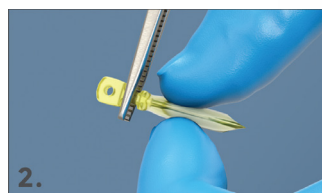

2.

Elija la cuña que mejor adapte la banda matriz a la porción gingival de la preparación y sosténgala con pinzas para algodón.



3.

Si es necesario, aplique una ligera presión con los dedos sobre la banda matriz para evitar que se desplace durante la colocación de la cuña.



4.

Si se requiere, utilice una cuña adicional para mejorar la adaptación a la superficie gingival.



5.

Coloque cuidadosamente el anillo de Halo utilizando el fórceps de Halo.



6.

Posicione el anillo lo más bajo posible, con los extremos de sus dientes apoyados sobre la cuña a cada lado del diente.



7.

Verifique la posición de la matriz, la cuña y el anillo, y asegúrese de que la banda matriz esté bien adaptada al margen cavo-superficial y en contacto íntimo con el diente adyacente.




SOLUCIONES RESTAURATIVAS

Adhesión



ULTRA-ETCH™
Control Total en el
manejo

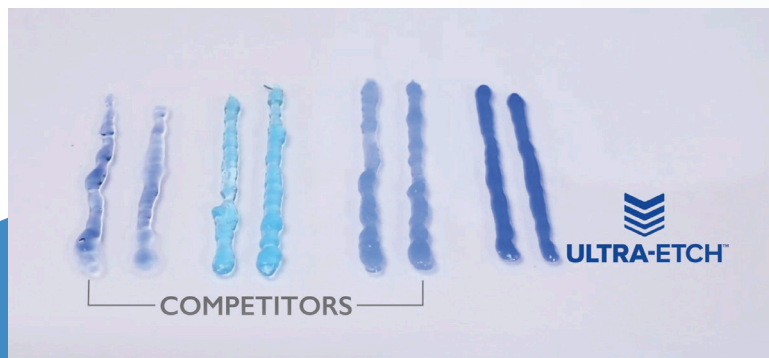

Aplicación de Ultra-Etch cortesía de la Dra. Jaleena Jesop



SOLUCIONES RESTAURATIVAS

Adhesión

PEAK

UNIVERSAL ADHESIVE SYSTEM

Todos los caminos conducen a Peak



Tecnología más avanzada exclusiva de Ultradent, **más fuerte que MDP**


Resultados superiores **cuando se combina con Ultra-Etch**



Con clorhexidina, asegura la fuerza de adhesión a largo plazo

Aplicación Universal, se adhiere fácilmente a **TODOS** los sustratos. (*composite, zirconia, porcelana, cerámica, metal, dentina y esmalte*)

Técnica 10 - 10 - 10

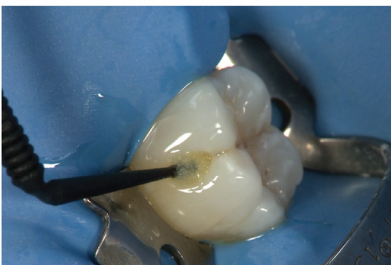

Frote la dentina y pinte sobre el esmalte durante **10 segundos** (una sola capa)



Adelgace con aire a mitad de presión y con succión de **10 segundos**. (Que quede con grosor de plástico para empaçar)



Fotopolimerice con VALO por **10 segundos** en modo estándar



SOLUCIONES RESTAURATIVAS

Composite

TRANSCEND™

UNIVERSAL COMPOSITE

Restauraciones en un solo tono


Tecnología patentada Resin Particle Match®
efecto camaleón



Consistencia ideal,
fácil de esculpir


Tono UB universal, no requiere bloqueador u opacador

Alta resistencia y **brillo que se mantiene**

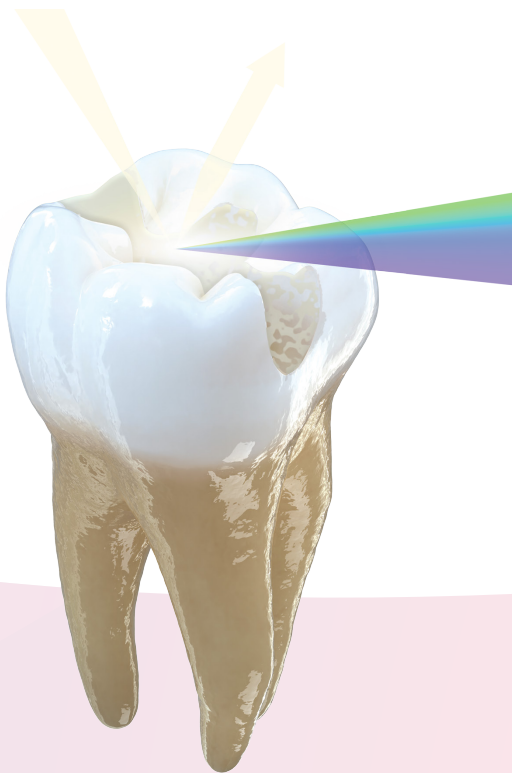

RESIN PARTICLE MATCH™

Guía de color

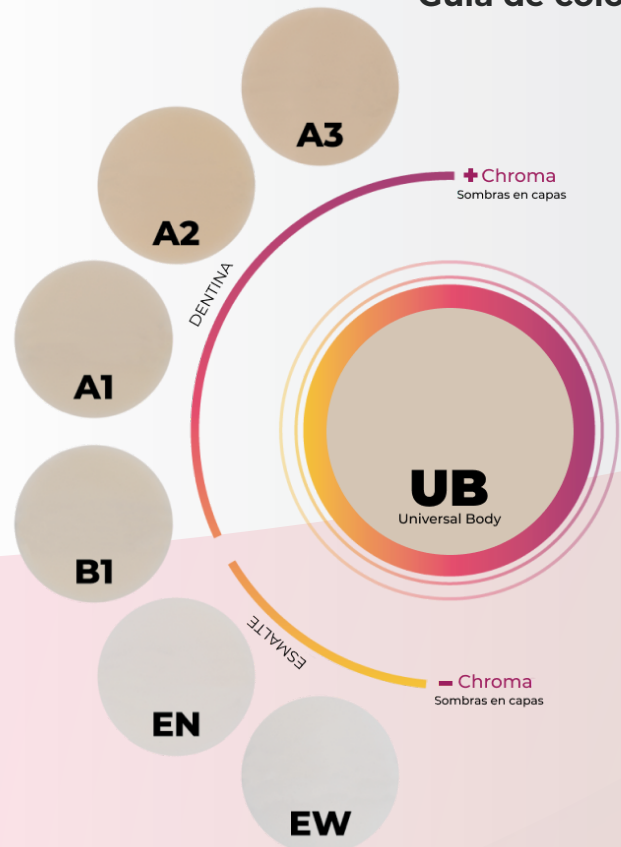

Los índices de refracción de la resina y sus partículas trabajan en conjunto para que Transcend se funda con el tono de los dientes adyacentes, logrando resultados naturales sin bloqueador u opaquer.



SOLUCIONES RESTAURATIVAS

Composite

FORMA™
ZIRCONIA NANO-HYBRID COMPOSITE
OneStepColor



Consistencia para un **fácil manejo y pulido**



Zirconia Nanohíbrida



Fluorescencia Natural



KleenSleeve™
Cubierta interna que mantiene la resina en el tubo y evita que el color se contamine.

Suave y fácil de esculpir. **Altamente estética.**

Impresion en láser para evitar el desvanecimiento propio de las etiquetas.

Resistencia superior al desgaste y a la fractura en dientes posteriores.

Tonos disponibles:



Kits para sus necesidades:




Para dientes blanqueados y carillas



Kit FORMA día a día



Kit FORMA

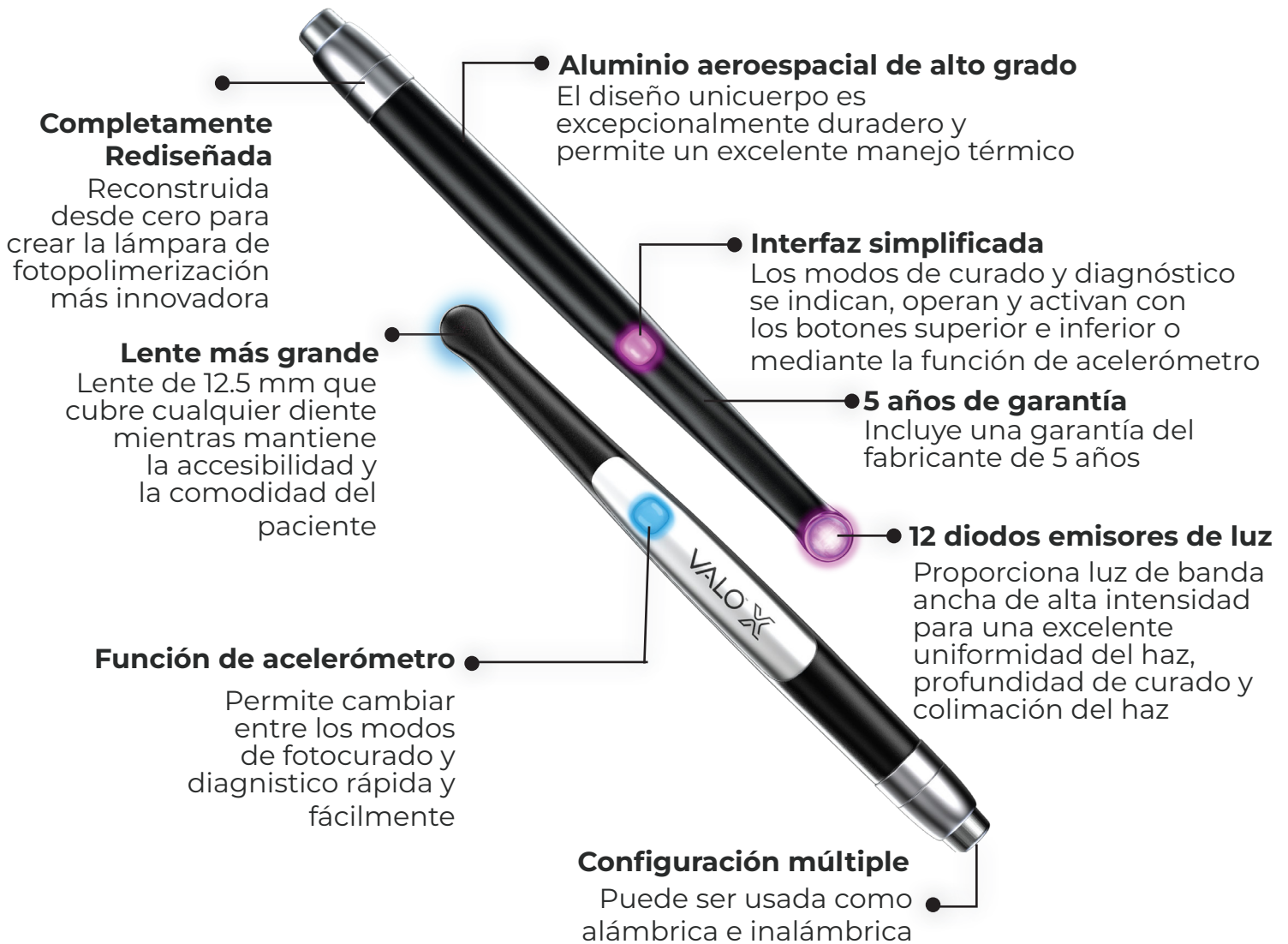

LENTES DE CURADO

LENTES DE DIAGNOSTICO

**LENTE
POINTCURE**

**LENTE
PROXICURE**

**LENTE
TRANSLUME**

**LENTE
INTERPROXIMAL**

**LENTE
DIFUSOR**





SOLUCIONES RESTAURATIVAS


Acabado

Jiffy™

Una solución completa para acabado y pulido



- ▶ Recrea el **brillo natural del esmalte**
- ▶ Grano de diamante Ultradent para un **acabado uniforme en cualquier resina**
- ▶ Sistema de pulido rápido y **sencillo en solo 2 pasos**

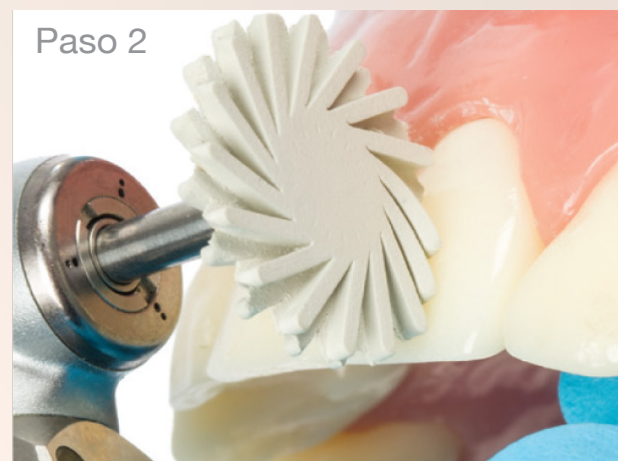

Velocidad recomendada: 5,000–8,000 RPM

Secuencia recomendada para todas las resinas compuestas especialmente las con partículas de zirconia, ej: Resina FORMA.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

PermaSeal™

Sellante de composite de alta penetración

- Protege y revitaliza las restauraciones de composite.
- Alta capacidad de penetración, baja viscosidad.



Composite Wetting Resin

Resina humectante

- Facilita la adaptación del composite.
- Humedece el composite seco durante el modelado.
- No afecta a la polimerización.



Sable™ Seek™

Indicadores de caries

- Identifica la dentina desmineralizada.
- Disponible en verde oscuro para trabajar cerca de la pulpa.
- Ayuda a identificar fácilmente los conductos del canal radicular.



Ultra-Blend™ plus

Forro cavitario

- Pasta fotopolimerizable de hidróxido de calcio.
- No se disuelve con el paso del tiempo.
- Adhesión a la dentina.



PermaFlo™

Composite fluido

- Excelente fluidez con una alta carga (68%).
- Formulación con liberación de flúor.
- Disponible en colores vita y en rosado.



Jiffy™ Spin

Discos de acabado y modelado

- El disco con grano de diamante sirve para dar forma y eliminar restos rápidamente.
- Los discos ultrafinos son perfectos para dar forma y acabado interproximal.
- Para resinas compuestas y cerámicas.



Diamond Polish

Pasta pulidora diamantada

- Partículas microcristalinas de diamante para alto brillo.
- Uso con cepillos de pelo de cabra o ruedas de fieltro.
- Refrescante sabor menta.



Umbrella™

Retractor de lengua, labios y mejillas

- Retracción cómoda y estable de lengua, labios y mejillas, con fácil colocación.
- Mayor acceso y visibilidad al área de trabajo en distintos procedimientos.
- Versátil y seguro: ideal para sellantes, restauraciones, blanqueamiento, ortodoncia, escáner e impresiones





**SOLUCIONES
RESTAURATIVAS**

Descubra cómo las Soluciones Restauradoras de Ultradent pueden ayudarle a crear restauraciones exitosas y duraderas, en las que tanto usted como sus pacientes puedan confiar.



VALO™ X
BROADBAND LED CURING LIGHT

SEIS COLORES NUEVOS
MISMA IMPRESIONANTE POTENCIA

¡Síguenos!



la.ultradent.blog
Ultradent Latinoamérica

© 2025 Ultradent Products, Inc. Todos los derechos reservados.

ULTRADENT.LAT

